



ZIBOJECT



## FICHA TÉCNICA

### PRODUCTO:

Termómetro Digital MC-101

### MARCA:

ZIBOJECT

### FABRICANTE:

WuxiExanovoMedical Instrument CO, LTD

### USOS:

Se utiliza para medir la temperatura del cuerpo humano, adecuado para uso oral, axila y ano

### VIDA ÚTIL:

3 años

### ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

### PRESENTACIÓN:


- Empaque Unitario en Caja de Cartón

## INSTRUCCIONES DE USO:

USO	FUNCIÓN
ORAL	<p>COLOQUE EL TERMÓMETRO DEBAJO DE LA LENGUA, CIERRE LA BOCA Y RESPIRE UNIFORMEMENTE POR LA NARIZ PARA EVITAR QUE LA MEDICIÓN SE VEA AFECTADA POR AIRE INHALADO/EXHALADO</p> <p><b>TEMPERATURA NORMAL:</b> 35.7°C - 37.3°C</p>
RECTAL	<p>LUBRIQUE LA PUNTA DE LA SONDA DE PLATA CON VASELINA PARA UNA FÁCIL INSERCIÓN. INSERTE SUAVEMENTE EL SENSOR APROXIMADAMENTE 1 CM EN EL RECTO</p> <p><b>TEMPERATURA NORMAL:</b> 36.2°C - 37.7°C</p>
AXILA	<p>SEQUE LA AXILA. COLOQUE LA SONDA EN LA AXILA Y MANTENGA EL BRAZO PRESIONADO FIRMEAMENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MÉDICO.</p> <p><b>TEMPERATURA NORMAL:</b> 35.2°C - 36.7°C</p>

## SISTEMAS:

- Electrónico
- Subsistemas:
  - *Probe*: Punta de Toma de Prueba en acero inoxidable
  - *LCD*: Pantalla en cristal líquido
  - Botón ON/OFF
  - Tapa de la Batería y Baterías

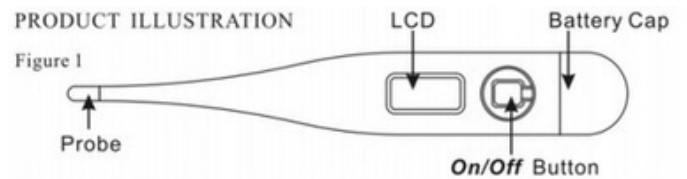

## GARANTÍA:

El termómetro está garantizado por un año a partir de la fecha de compra. Si el termómetro no funciona correctamente debido a componentes defectuosos o mano de obra deficiente, lo repararemos o reemplazaremos sin cargo.

Todos los componentes están cubiertos por esta garantía, excepto la batería. La garantía no cubre daños a su termómetro debido a un manejo inadecuado. Para obtener el servicio de garantía, se requiere un original o una copia del recibo o factura de compra del minorista ORIGINAL.

WUXI BEANOV MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

## TIPO DE RIESGO:

- IIA