



FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:

Termómetro Digital MC-101

MARCA:

ZIBOJECT

FABRICANTE:

WuxiExanovoMedical Instrument CO, LTD

USOS:

Se utiliza para medir la temperatura del cuerpo humano, adecuado para uso oral, axila y ano

VIDA ÚTIL:

3 años

ALMACENAMIENTO:

Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.

PRESENTACIÓN:

- Empaque Unitario en Caja de Cartón

TIPO DE RIESGO:


- IIA

INSTRUCCIONES DE USO:

USO	FUNCIÓN
ORAL	COLOQUE EL TERMÓMETRO DEBAJO DE LA LENGUA, CIERRE LA BOCA Y RESPIRE UNIFORMEMENTE POR LA NARIZ PARA EVITAR QUE LA MEDICIÓN SE VEA AFECTADA POR AIRE INHALADO/EXHALADO TEMPERATURA NORMAL: 35.7°C - 37.3°C
RECTAL	LUBRIQUE LA PUNTA DE LA Sonda DE PLATA CON VASELINA PARA UNA FÁCIL INSERCIÓN. INSERTE SUAVEMENTE EL SENSOR APROXIMADAMENTE 1 CM EN EL RECTO TEMPERATURA NORMAL: 36.2°C - 37.7°C
AXILA	SEQUE LA AXILA. COLOQUE LA Sonda EN LA AXILA Y MANTENGA EL BRAZO PRESIONADO FIRMEMENTE DESDE UN PUNTO DE VISTA MÉDICO. TEMPERATURA NORMAL: 35.2°C - 36.7°C

SISTEMAS:

- Electrónico
- Subsistemas:
 - *Probe*: Punta de Toma de Prueba en acero inoxidable
 - *LCD*: Pantalla en cristal líquido
 - Botón ON/OFF
 - Tapa de la Batería y Baterías

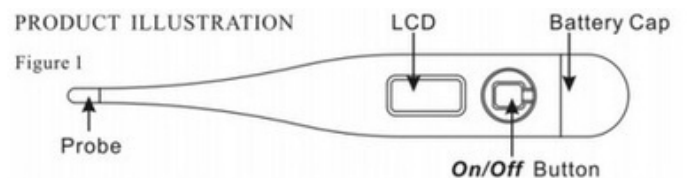

GARANTÍA:

El termómetro está garantizado por un año a partir de la fecha de compra. Si el

~~termómetro~~ ~~no~~ funciona debido a componentes defectuosos o mano de obra deficiente, lo repararemos o reemplazaremos sin cargo.

Todos los componentes están cubiertos por esta garantía, excepto la batería. La garantía no cubre daños a su termómetro debido a un manejo inadecuado. Para obtener el servicio de garantía, se requiere un original o una copia del recibo o factura de compra del minorista ORIGINAL.

FUXI EXANOVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2021DM-0023678

Carrera 26 # 14 - 38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierzibobject@yahoo.es - administracion@zibobject.com

www.zibobject.com

Bucaramanga - Colombia