

PRODUCTO	Venda de Yeso Ziboject		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Anji Hongde Meddical Produch CO. LTD	TIPO DE RIESGO		I
IMAGEN PRODUCTO		INVIMA	2024DM-0028702	
		USOS		
		Las vendas de yeso son un insumo utilizado para inmovilizar y estabilizar zonas del cuerpo lesionadas como fracturas o esguinces graves, permitiendo la curación de huesos y tejidos. Sus características principales son: reacción con el agua para volverse moldeables y endurecerse rápidamente, formando una cáscara rígida; rigidez y estabilidad una vez están secas; facilidad de moldeado cuando están húmedas para adaptarse a la anatomía y protección a la piel subyacente mediante una almohadilla inicial (venda de algodón).		
COMPOSICIÓN				
• Tejido base: Gasa 100% algodón • Yeso de París: Sulfato de Calcio Hemihidratado • Aditivos especiales				
CARACTERÍSTICAS				
• FRAGUADO INICIAL: El yeso alcanza una consistencia semi-dura y no debe ser manipulado ni sometido a presión, ya que debilita la estructura. Tiempo aproximado 3-5 minutos. • FRAGUADO FINAL: Es el momento en que el yeso está completamente endurecido y puede soportar movimientos sin sufrir daños. Tiempo aproximado 13 a 15 minutos • ALTA RESISTENCIA: Minimiza la pérdida de yeso gracias a su tejido entrelazado, garantizando una fijación uniforme • FÁCIL APLICACIÓN: Se activa al sumergirse en agua limpia y tibia o a temperatura ambiente (25°C a 30*c), permitiendo un moldeado óptimo antes del secado. • EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO: Protege contra la humedad y garantiza la calidad del producto hasta su uso • VERSATILIDAD: Adecuada para aplicaciones médicas en traumatología, rehabilitación y fabricación				
PRESENTACIÓN	VIDA ÚTIL		ALMACENAMIENTO	
Referencias: 3" X 5 YDS 4" X 5 YDS 5" X 5 YDS 6" X 5 YDS 8" X 5 YDS	5 años, a partir de la fecha de esterilización, siempre y cuando el paquete esté intacto		Guardado: 5 - 40° C, protegidos del calor, la humedad, la luz y el ozono	