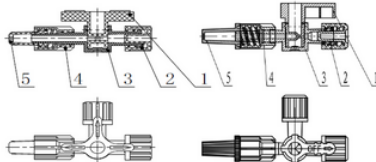


PRODUCTO	Llave de 3 vías		MARCA	ZIBOJECT
FABRICANTE	Jiangsu Webest Medical Product CO, LTD	TIPO DE RIESGO		IIA
IMAGEN PRODUCTO			INVIMA	2025DM-0000137-R2
			USOS	
			Llave de tres vías esta formada por el cuerpo de la válvula, núcleo de la válvula, tapa rosca, conexión de bloqueo y protector. Se utiliza en conexión con el dispositivo de infusión para el control y la conversión de diferentes vías durante la transfusión de sangre, dosificación y medición de presión venosa.	
COMPOSICIÓN		PRECAUCIONES		
El cuerpo de la válvula esta compuesto de material PC (POLICARBONATO). El núcleo de la válvula y la conexión de bloqueo están formados por Polietileno. La tapa rosca y protector están formados por ABS (ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO)  1. elemento de la válvula 2. apa espiral 3. cuerpo de la válvula 4. espiral de bloqueo 5. tapa protectora		1. Este producto debe ser utilizado únicamente por médicos capacitados o cuidadores. 2. Verifique la fecha de esterilización y el período de validez del producto antes de usarlo. 3. Después de que el producto esté conectado al dispositivo de infusión, debe eliminarse el aire interno antes de poder ser usado en pacientes. 4. Este producto es de un solo uso clínico, deséchelo después de usarlo. 5. Si la cubierta protectora del producto se cae, hay materia extraña en un solo paquete o el empaque está dañado, queda estrictamente prohibido usarlo. 6. Cuando el producto se utiliza con equipos de infusión a presión, la presión máxima que puede soportar no debe exceder los 200 kPa. 7. Este producto está limitado a un solo uso; después de usarlo, deséchelo de acuerdo con las disposiciones correspondientes para su correcta eliminación. 8. Este producto está esterilizado con óxido de etileno, con una validez de cinco años. 9.El paquete pequeño debe usarse inmediatamente después de abrirlo.		
NORMAS TÉCNICAS		MODO DE USO		
• ISO2859-1:1999 • ISO 8536-4-2010 • Y/ZB001-2008 • ISO80369-7		1. Seleccione las especificaciones y modelos del producto requeridos según las necesidades clínicas. 2. Abra el paquete pequeño a lo largo de la abertura y saque la válvula de tres vías. 3. Retire las tapas roscadas y las tapas protectoras en ambos extremos de la válvula de tres vías, conecte la unión de tres vías con el dispositivo de infusión correspondiente según la necesidad clínica, apriete la unión y asegure el sellado de cada parte de la conexión. 4. Según las necesidades clínicas, abra o cierre el acceso en la dirección indicada por la flecha en la parte superior del carrete para entrar en uso normal. 5. Cuando no haya necesidad de infusión o de apertura, el carrete puede girarse para cortar el acceso.		
VIDA ÚTIL				
5 años				
ALMACENAMIENTO				
Almacenar a temperatura ambiente, en un lugar limpio y seco, protegido de la luz.				
PRESENTACIÓN				
Empaque individual estéril blister Caja por 50 unidades Caja por 100 unds				

Carrera 26 #14-38 Barrio San Francisco | Teléfono (607) 6507598 | Cel 310-7788678

javierziboproject@yahoo.es - administracion@ziboproject.com

www.ziboproject.com

Bucaramanga - Colombia