

<b>PRODUCTO</b>	Mascarilla Médica Desechable		<b>MARCA</b>	ZIBOJECT
<b>FABRICANTE</b>	Jinhua Jingdi Medical Supplies CO, LTD	<b>TIPO DE RIESGO</b>		I
<b>IMAGEN PRODUCTO</b>		<b>INVIMA</b>		2021DM-0023688
		<b>USOS</b>		
		<p>Para que todo tipo de personal, cubre la boca, nariz y mandíbula del usuario, para proporcionar una cierta barrera física para evitar la penetración directa de patógenos, microorganismos, partículas, etc.</p> <p>es un dispositivo de un solo uso desechable no estéril, adecuado para la protección sanitaria del usuario en entornos médicos generales y para la atención general en lugares públicos donde exista riesgo de fluidos corporales y salpicaduras.</p> <p>Cómo usar el dispositivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque la pinza nasal hacia arriba y extienda la mascarilla de arriba a abajo.</li> <li>2. Cuelgue el elástico en la oreja y presione suavemente la pinza nasal a lo largo del puente de la nariz para ajustar el plástico a la cara.</li> <li>3. Tire del extremo inferior de la mascarilla hacia la mandíbula inferior para una máxima protección</li> </ol>		
<b>COMPOSICIÓN</b>		<b>PRECAUSIONES Y ADVERTENCIAS</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tela no tejida</li> <li>• La mascarilla desechable consta de tres capas:</li> <li>• Capa exterior: polipropileno spunbond de 25 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Capa intermedia: polipropileno meltblown de 25 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Capa interior: polipropileno spunbond de 25 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Empaque: igual presentación: azul y negro</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• No altere ni modifique este producto de ninguna manera.</li> <li>• Siga las instrucciones del fabricante para ajustar la mascarilla.</li> <li>• Mantenga la mascarilla en su caja, alejada de la luz solar directa, hasta su uso.</li> <li>• Estas mascarillas no deben usarse en tanques, espacios cerrados ni en ninguna circunstancia donde pueda haber gas, ni en atmósferas con deficiencia de oxígeno.</li> <li>• De un solo uso. Deseche la mascarilla usada después de un solo uso (no más de 8 horas).</li> </ul>		
<b>NORMAS TÉCNICAS</b>		<b>ALMACENAMIENTO</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 14683: 2019</li> <li>• ISO 10993-1:2018,</li> <li>• EN ISO10993-5:2009</li> <li>• EN ISO 10993-10:2013</li> <li>• ISO 13485:2016</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• La mascarilla debe colocarse en un recipiente y almacenarse en un ambiente limpio, fresco y seco para protegerla del polvo, la humedad, el calor excesivo y la luz solar directa.</li> <li>• -5 °C a 50 °C y la humedad relativa no debe superar el 80 %.</li> </ul>		
		<b>VIDA ÚTIL</b>		
		3 Años		